

# Substanztests

Wenn man auf Pulver, Tabletten oder Flüssigkeiten stösst, die man nicht zuordnen kann, sind unsere Substanztests ideal. Zerschneiden Sie einfach die Ampulle, füllen ein wenig der Substanz mithilfe des Spatels ein und warten Sie ab, welche Farbe sich entwickelt. Sie erhalten das Ergebnis innert Sekunden.



Hier geht's zum Online-Shop

Methadon / Ketamin



GHB



Heroin



GBL



Kokain



Ecstasy / Methamphetamin



Buprenorphin



LSD



Opiate / Amphetamine



Cannabis



Synthetische Cathinone



Ephedrin



Multi Test (COC, LSD, KET, OPI, AMP)



THC / CBD (Unterscheidung & Identifikation)



Morphine / Heroin



## Anwendung:



1. Zerschneiden Sie die Ampulle.



2. Füllen Sie die Substanz in die Ampulle.



3. Verschliessen Sie die Ampulle durch die Verschlusskappe.